



Referência em Testes de Contato
desde 1993



BATERIA ALIMENTOS

SUBSTÂNCIA	CONCENTRAÇÃO	VEÍCULO
Amendoim	20%	Vaselina sólida
Camarão	10%	Vaselina sólida
Caseína	15%	Vaselina sólida
Castanhas MIX (*)	20%	Vaselina sólida
Clara de Ovo	20%	Vaselina sólida
Gema de Ovo	20%	Vaselina sólida
Leite	40%	Vaselina sólida
Milho	20%	Vaselina sólida
Soja	20%	Vaselina sólida
Trigo	20%	Vaselina sólida
Controle	100%	Vaselina sólida

(*) Castanhas MIX é composto por Castanha do Pará e Nozes a 20%

Alergia alimentar é uma reação adversa a algum tipo de alimento, que após sua ingestão provoca uma reação anormal ao indivíduo. O sistema imunológico pode mediar a reação pela IgE (imunoglobulina E) ou pela participação dos linfócitos T e eosinófilos, ou ainda uma combinação de ambas.

As reações mais comuns são urticárias, coceira, eczema, inchaços, vômitos, diarreias, tosse e chiados no peito. Choques anafiláticos também podem ocorrer mas são mais raros.

Para se diagnosticar a alergia é necessário realizar uma pesquisa clínica apurada que permita direcionar ao alimento desencadeador e seu mecanismo fisiopatológico utilizando-se também para isso alguns exames que atestem o diagnóstico, entre eles o Atopy Patch Test.

O Atopy Patch Test (Teste Atópico de Contato) vem sendo aplicado na avaliação das reações tardias mediadas pelos linfócitos T, mas também nas imediatas mediadas pelas IgE.

A interpretação do Atopic Patch Test tem sido feita através de padronização realizada pela ETFAD (European Task Force on Atopic Dermatitis) em 2.003 e é a seguinte:

LEITURA	RESULTADO
(-) sem alteração cutânea	Negativo
(?) somente eritema	Duvidoso
(+) eritema e infiltração	Positivo
(++) eritema e pequenas pápulas	Positivo
(+++) eritema e várias pápulas	Positivo
(++++) eritema e vesículas	Positivo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dreborg S, Frew A. Position papers: Allergen standardization and skin tests. 1993;47(Suppl 14):49-54.
- Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol (Stockh) 1980;92:44-7.
- Sampson HA. The evaluation and management of food allergy in atopic dermatitis. Clin Dermatol 2003;21:183-92.
- Ben-Gashir MA. Predictors of atopic dermatitis severity over time J Am Acad Dermatol 2004;50:349-56.



ENDO-DERME FÓRMULAS MAGISTRAIS LTDA.

R. Dr. Franco da Rocha, 122
CEP 05015 040 • Perdizes • São Paulo • SP
Fone/Fax: (11) 3864.5937 / (11) 3872.7714
Autorização MS - 7.25526.2
baterias@endoderme.com.br
www.endoderme.com.br